

Návod k použití

Cavex Bite&White StainLess

Popis produktu

Před zahájením bělení zubů je velmi důležité zuby řádně vyčistit, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.

Cavex Bite&White StainLess je aktivátor bělení zubů a pasta na odstranění skvrn. Odstraňuje povrchové skvrny a plak ze zubů. Kromě toho zlepšuje výsledky bělení optimalizací pH v ústech.

- Mírně abrazivní pro sklovinu / dentin
- Vysoká čisticí a lešticí schopnost.
- Zvyšuje pH v ústech jako předběžná léčba pro bělení zubů.
- Není určeno k pravidelnému používání.

Složení

Aqua, sorbitol, hydratovaný oxid křemičitý, glycerin, erythritol, křemičitan lithno-hořečnatý-sodný, poloxamer, hexametafosforečnan sodný, celulózová guma, xanthanová guma, fenoxylethanol, sacharin sodný, mátová příchut', limonen, CI 42090.

Indikace k použití

Pasta se používá jako aktivátor pro předběžnou úpravu při bělení zubů v ordinaci a/nebo doma.

Kontraindikace a varování

Kontraindikace

Nepoužívejte v případě alergie na mátovou vůni nebo některou ze složek.

Možné nežádoucí účinky

V jednotlivých případech nelze vyloučit přecitlivělost na přípravek nebo jeho složky.

Skladovací podmínky

Nepoužívejte materiál po uplynutí doby použitelnosti. Neskladujte při teplotách vyšších než 25 °C (77 °F). Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte na chladném a suchém místě (bez mrazu). Po použití tubu vždy pevně uzavřete. Uchovávejte mimo dosah dětí.


Upozornění

V případě zasažení očí důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte materiál po uplynutí doby použitelnosti.


Návod k použití

Manipulace


1. Naneste Cavex Bite&White StainLess na zubní kartáček

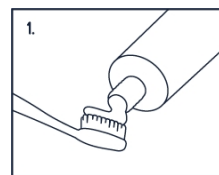


2. Zuby důkladně vyčistěte.

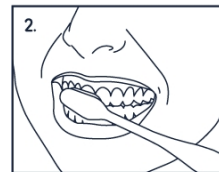


3. Čistěte zuby alespoň 2–3 minuty.

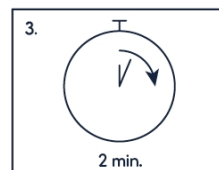

4. Vyplivněte přebytečný materiál.

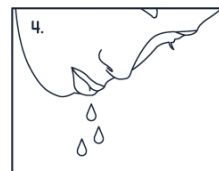

5. Neoplachujte vodou.

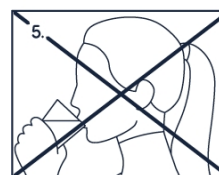

Označení:

Tyto informace jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích a také s evropskou legislativou.

Určené pacienty

Cavex B&W StainLess může být použit kdokoli starší 18 let jako předběžná léčba před použitím bělícího gelu.

U těhotných a kojících žen je nutné pečlivě zvážit rizika léčby ve srovnání s přínosy s ohledem na nenarozené dítě nebo kojence.

Určení uživatelé

Cavex B&W StainLess používají hlavně zubní lékaři. Po konzultaci se zubním lékařem může produkt používat i pacient doma.

Klinické přínosy

U přípravku Cavex B&W StainLess lze uvažovat o následujících klinických výhodách:

Pasta StainLess důkladně čistí zuby, což umožňuje přímý kontakt bělícího gelu se zubní sklovinou. Odstraňuje povrchové skvrny ze zubů a dočasně zvyšuje hodnotu pH v ústech. Tímto způsobem extrémně čistící pasta StainLess optimalizuje účinnost peroxidu vodíku.

Návod k použití

Tvrzení

- Důkladné čištění a odstranění zubního plaku
- Zvyšuje pH v ústech a optimalizuje podmínky pro bělení
- Svěží a příjemná chuť

Vlastnosti a specifikace produktu

Každá šarže Cavex Bite&White StainLess splňuje naše interní testy:

Test	Zkušební metoda	Specifikace Cavex Stainless Release	
Vzhled	B10	Modrá pasta	
Chuť	B11	Příchuť limetky / máty	
pH	B12	6,8 – 8,2	
Viskozita	B13	10 – 10000	Pa.s

Kombinované produkty:

Příslušenství:

Cavex B&W StainLess nevyžaduje žádné specifické kombinace s příslušenstvím.

Kombinované produkty:

Cavex B&W StainLess lze použít v kombinaci s bělicím ošetřením.

Doporučení pro skladování

Nepoužívejte materiál po uplynutí doby použitelnosti. Neskladujte při teplotách vyšších než 25 °C (77 °F). Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte na chladném a suchém místě (bez mrazu). Po použití tubu vždy pevně uzavřete. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace o likvidaci

Likvidujte v souladu s místními předpisy. Obsah ani částečně vyprázdňené obaly nevyhazujte do domovního odpadu ani je nevylévejte do kanalizace.

Cavex Holland BV
Fustweg 5 2031CJ
Haarlem
Nizozemsko T +31
23 5307700
dental@cavex.nl

Vyrobeno v Nizozemsku

Naše technické poradenství, ať už ústní, písemné nebo formou zkoušek, je poskytováno v dobré víře, ale bez záruky, a to platí i v případě, že se jedná o vlastnická práva třetích stran. Nezabývá vás to povinností otestovat produkty, které vám dodáváme, z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a použití. Aplikace, použití a zpracování produktů jsou mimo naši kontrolu, a proto jsou zcela ve vaší odpovědnosti. Pokud by i přes tuto odpovědnost byla stanovena odpovědnost za jakoukoli škodu, bude omezena na hodnotu zboží dodaného námi a použitého vámi. Samozřejmě zajistíme konzistentní kvalitu našich produktů v rámci našich Všeobecných podmínek prodeje a dodání.

Verze: ZB713.00

Datum: 12. 9. 2023