

CAVEX EXSENSE



POPIS PRODUKTU

Cavex ExSense je ideálním řešením pro citlivé zuby. Citlivost zubů je často způsobena zubní erozí nebo obnaženým dentinem. Cavex ExSense je založen na 2% hydroxyapatitu, který pomocí hydrodisperzního solu utěsňuje tubuly a mikrotrhliny ve sklovině. Tím zcela uzavře citlivé oblasti. Přidání 0,1 % dusičnanu draselného také obnovuje mikrotvrdost prvků. Kromě úplného uzavření dochází ke krystalizaci, která podporuje a urychluje proces remineralizace.

Cavex ExSense je k dispozici v tubě (42 ml – 50 gramů), která vystačí přibližně na 20 ošetření. Produkt lze aplikovat různými způsoby, v závislosti na povaze citlivosti. Nejúčinnější metodou je použití individuálně vyrobené vaničky, která se naplní přípravkem Cavex ExSense a zuby se v ní nechají „koupat“ po dobu 10 minut. Pokud je potíže lokalizovaná, lze Cavex ExSense velmi účinně aplikovat na citlivé místo špičkou prstu. Poté se zásobník a přebytek odstraní a zásobník se opláchně vodou. Proceduru je třeba opakovat po dobu 10 dnů nebo podle pokynů zubního lékaře.

SLOŽENÍ

Hlavní složky: hydroxyapatit 2 %, dusičnan draselný 0,1 %

URČENÉ POUŽITÍ

Zubní desenzibilizátory, jako je Cavex ExSense, se používají v zubní praxi k úlevě od bolesti způsobené obnaženými krčky zubů nebo dentinem a k prevenci nebo úlevě od pooperační citlivosti.

INDIKACE

Cavex ExSense je založen na 2% hydroxyapatitu, který pomocí hydrodisperzního solu utěsňuje tubuly a mikrotrhliny ve sklovině. Tímto způsobem zcela uzavře citlivé oblasti. Přidání 0,1 % dusičnanu draselného také obnovuje mikrotvrdost prvků. Kromě úplného uzavření dochází také ke krystalizaci, která podporuje a urychluje proces remineralizace.

- Prevence a snížení citlivosti zubů.
- Po bělení zubů v zubní ordinaci a/nebo doma.
- Po profesionálním čištění zubů.

KONTRAINDIKACE A VAROVÁNÍ

Kontraindikace:

Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na mátu nebo některou z dalších složek.

Možné vedlejší účinky:

V jednotlivých případech nelze vyloučit přecitlivělost na přípravek nebo jeho složky.

Skladovací podmínky:

Skladujte při teplotě mezi 0 °C (32 °F) a 25 °C (77 °F).

Skladujte na chladném a suchém místě (bez mrazu) a chraňte před přímým slunečním zářením. Po použití tubu vždy pevně uzavřete. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění:

V případě zasažení očí důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti.

MANIPULACE

Zuby předem vyčistěte kartáčkem a dentální nití.

Aplikace bez vaničky:

Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem. Naneste malé množství přípravku Cavex ExSense na čistý prst a aplikujte jej na horní a dolní zuby. Gel nechte působit 10 minut. Přebytečný gel vyplivněte, ale poté ústa nevyplachujte.

S nosičem:

Naneste malé množství přípravku Cavex ExSense na celou plochu zásobníku. Vložte zásobník do úst a lehce jím pohybujte ze strany na stranu, aby se gel rozprostřel po zubech. jemně skousněte zásobník a nechte gel působit po dobu 10 minut. Vyjměte zásobník a vyplivněte přebytečný gel, ale poté ústa nevyplachujte. Zásobník opláchněte studenou vodou.

- Vždy ihned po použití uzavřete tubu víčkem.
- Pro dosažení nejlepších výsledků: po aplikaci nejméně 30 minut nepijte ani nejezte.
- Používejte Cavex ExSense jednou denně po dobu minimálně 10 dnů nebo postupujte podle pokynů svého zubního lékaře.

OZNAČENÍ:

Tyto informace jsou v souladu s normou ISO24234 a také s evropskou legislativou.

CAVEX EXSENSE



URČENÍ PACIENTI

Cavex ExSense je vhodný pro pacienty, kteří vyžadují zubní ošetření z následujících indikací, s přihlédnutím k kontraindikacím. U těhotných a kojících žen je nutné pečlivě zvážit rizika léčby ve vztahu k jejím přínosům, s přihlédnutím k nenarozenému dítěti nebo kojenci.

URČENÍ POUŽITÍ

Cavex ExSense smí používat pouze zubní lékaři.

KLINICKÉ VÝHODY

Desenzibilizátor na bázi biokompatibilního hydroxyapatitu s jednoduchou aplikací pro použití v ordinaci i doma.

TVRZENÍ

- Okamžitá a dlouhodobá úleva od citlivých zubů
- Pomáhá předcházet citlivosti zubů
- Urychluje a posiluje proces remineralizace

VLASTNOSTI A SPECIFIKACE PRODUKTU

V současné době není k dispozici produktová norma pro Cavex ExSense. Kontrola kvality se proto provádí podle řady interních norem.

<u>Charakteristika</u>	<u>Interní specifikace</u>	<u>Cavex ExSense</u>
Vzhled	Bílý gel	Bílý gel
pH	7,5 – 9	8,5 – 9
Viskozita	5 – 100	5 Pa.s

KOMBINOVANÉ PRODUKTY:

Cavex ExSense lze použít jako samostatný produkt nebo aplikovat pomocí lžice (tj. individuální vyrovnávací lžice nebo standardní zubní lžice).

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Podle nařízení EU o zdravotnických prostředcích jsou uživatelé/pacienti povinni hlásit závažné incidenty se zdravotnickým prostředkem výrobcí a příslušnému orgánu země, ve které k incidentu došlo.

UPOZORNĚNÍ K SKLADOVÁNÍ

Neskladujte při teplotách vyšších než 25 °C (77 °F). Nepoužívejte tento materiál po uplynutí doby použitelnosti. Vyvarujte se přímému slunečnímu záření. Po použití tubu pevně uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidujte v souladu s místními předpisy. Obsah ani částečně vyprázdněné obaly nevyhazujte do domovního odpadu ani je nevylévejte do kanalizace.

Naše technické poradenství, ať už ústní, písemné nebo formou zkoušek, je poskytováno v dobré víře, ale bez záruky, a to platí i v případě, že se jedná o vlastnická práva třetích stran. Nezabývá vás to povinností otestovat produkty, které vám dodáváme, z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a použití. Aplikace, použití a zpracování produktů jsou mimo naši kontrolu, a proto jsou zcela ve vaší odpovědnosti. Pokud by i přes tuto odpovědnost byla stanovena odpovědnost za jakékoli škody, bude omezena na hodnotu zboží dodaného námi a použitého vámi. Samozřejmě zajistíme konzistentní kvalitu našich produktů v rámci našich Všeobecných podmínek prodeje a dodání.

 Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031CJ Haarlem
Nizozemsko T +31
23 53077 00
dent al@cavex.nl

Vyrobeno v Nizozemsku

ZB719.04

CAVEX