

ANA Fulfill®



**Nordiska
Dental**

Návod k použití

Cílová skupina pacientů

Děti, dospívající, dospělí a starší pacienti

Předpokládaný uživatel

Zubař

Složení

Kvalitativní údaje:

Oligomerní methakryláty, oxid křemičitý, sklokeramika

Kvantitativní údaje v % G/G:

Oligomerní metakryláty 23, plniva midi 4, mini 65 a nano 8

Účel použití produktu

ANA Fulfill je světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní univerzální výplňový kompozit.

Indikace

Restaurace všech tříd kavit.

Kontraindikace

Použití přípravku ANA Fulfill je kontraindikováno, pokud není možné provést vysušení nebo doporučenou aplikační techniku. Nepoužívejte přímo na otevřenou pulpu nebo v případě známé alergie na některou ze složek.

Vlastnosti produktu

ANA Fulfill je univerzální výplňový kompozit, který vytvrzuje světlem.

Zvláštní preventivní opatření

Žádná

Použití

- Před preparací zub očistěte a všechny zbytky čisticích prostředků odstraňte vodním sprejem. Určete barvu zubu podle stupnice Víta®. Doporučuje se použití kofferdamu.
- Kavitu připravte podle obecných pravidel adhezivní techniky. Zkoste okraje skloviny a chraňte oblasti v blízkosti pulpy.
- V případě potřeby proveďte leptání podle vaší preferované techniky, např. Total-Etch. Dodržte návod k použití použitého materiálu.
- Naneste adhezivní prostředek. (např. ANA Bond)
- V případě potřeby vložte podkladovou výplň z tekutého kompozitu (ANA Fulfill Flow) nebo kompoméru. Doporučuje se použití matrice.
- Kavitu vyplňte v požadované barvě vrstvami o maximální tloušťce 2 mm. Každou vrstvu vytvrzujte světlem po dobu 20 sekund.
- Odstranění přebytků, konturování a jemné doladění se provádí např. pomocí diamantových finišerů a flexibilních kotoučů s klesající zrnitostí. Leštění na vysoký lesk lze provádět pomocí leštících past (např. Vision Paste) s použitím leštících kalíšků/kotoučů.

Pokyny pro zpracování

V každém případě je nutné dodržovat pokyny pro zpracování a bezpečnostní opatření popsané v návodu k použití přiloženém k produktu. Pokud i přes dodržení těchto pokynů dojde u pacienta k nežádoucí reakci nebo k jiným nežádoucím jevům, prosíme v každém případě o zaslání zprávy s co nejpřesnějším popisem okolností.

Varování/zbytková rizika

Bezpodmínečně dodržujte

- Světelná zařízení by měla vyzařovat při 450 nm a měla by být pravidelně kontrolována. Umístěte světlo co nejbližší k výplňovému materiálu.
- Neodstraňujte vrstvu inhibovanou kyslíkem, protože je potřebná pro spojení s další vrstvou.
- Je třeba dodržovat pokyny k použití jiných materiálů, které se používají s ANA Fulfill.

UPOZORNĚNÍ

Pomůcky pro aplikaci patřící k produktu (kanyly, jednorázové špendlíky atd.) jsou určeny pouze k jednorázovému použití u jednoho pacienta!

Nežádoucí účinky

Dosud nejsou známy žádné vedlejší účinky. V ojedinělých případech nelze vyloučit přecitlivělost na složky materiálu. Vyvarujte se kontaktu pasty s kůží. V případě náhodného kontaktu okamžitě omyjte vodou a mýdlem. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pokud se u vás vyskytnou nežádoucí vedlejší účinky – i v pochybných případech – informujte nás prosím v každém případě a co nejpřesněji popište okolnosti a příznaky.

Rizika předávkování nejsou známa.

Interakce

Vyhňte se materiálům obsahujícím eugenol, vlhkosti a vzduchu obsahujícímu olej; mohou zabránit polymeraci v místě kontaktu. Při použití kationtových ústních vod, odhalovačů zubního plaku nebo chlorhexidinu může dojít ke změně barvy.

Skladování

Skladujte v suchu, při teplotě do 22 °C. Po použití stříkačku ihned uzavřete, aby materiál neztratil vlivem okolního světla.

Minimální doba použitelnosti

Po uplynutí doby použitelnosti již nepoužívejte.

Varianty

REF 1301000: ANA Fulfill, náplň, A1, 4,5 g 1302000:
REF ANA Fulfill, náplň, A2, 4,5 g 1303000: ANA
REF Fulfill, náplň, A3, 4,5 g 1303500: ANA Fulfill,
REF náplň, A3,5, 4,5 g

Likvidace

Nepoužitý materiál lze po vytvrzení vyhodit do domovního odpadu.

Všechny závažné incidenty související s tímto výrobkem je třeba nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient sídlo.

Distributor ČR BOME Dental s.r.o.

Šípková 220, 251 0 Čestlice

Tel.: 602 653 168 e-mail: info@bomedental.eu



dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Německo
Tel.: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

Nordiska Dental AB
Framtidsgatan 1b
26273 Ängelholm/Švédsko
Tel.: +(46) 431/443360
www.nordiskadental.se
mail@nordiskadental.se



Nebezpečí Danger

H317 Může vyvolat alergické kožní reakce H318 Způsobuje vážné poškození očí
H411 Jedovatý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Vyrobeno v Německu



11.11.2024