

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX SILICONA BITE

-

Meteen perfect,
altijd!



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX SILICONA BITE

Een goed beetregistratie-materiaal hoort prettig en eenvoudig in gebruik te zijn. Idealiter zorgt het ervoor dat de beetregistratie al vanaf de eerste poging perfect is. Dit is alleen haalbaar als het materiaal gebruiksvriendelijk, makkelijk te hanteren en 100% nauwkeurig is.

Cavex SiliconA Bite voldoet ruimschoots aan al deze criteria. Dit materiaal heeft een zeer korte verwerkingstijd en uithardingstijd van slechts 30 seconden elk. Daarnaast is het materiaal sterk gevuld, waardoor het een hardheid bereikt van Shore D 40 (vergelijkbaar met Shore A >94). Door deze ideale combinatie van eigenschappen en een uitstekende thixotropie zorgt Cavex SiliconA Bite voor een perfecte beetregistratie.

De hoge hardheid (Shore D 40) garandeert een uiterst nauwkeurige registratie van de occlusie, die na verloop van tijd niet afneemt in nauwkeurigheid. Cavex SiliconA Bite is eenvoudig te trimmen en te slijpen, wat het materiaal bijzonder prettig maakt voor tandtechnici om mee te werken.

Assortiment:

AS54 Cavex SiliconA bite 2 x 50 ml cartridges

Dankzij de korte verwerkingstijd en uithardingstijd is de totale stoeltijd voor een beetregistratieprocedure slechts één minuut. Dit verhoogt aanzienlijk het comfort van de patiënt en minimaliseert bovendien de kans op onnauwkeurigheden door snelle stabilisatie.

Een belangrijke stap bij de procedure is het aanbrengen van het materiaal op de tanden. Dankzij speciale beetregistratietips ontstaat er een gelijkmatige en homogene laag Cavex SiliconA Bite op het beetoppervlak. De thixotrope eigenschappen zorgen ervoor dat het materiaal goed blijft zitten waar het wordt aangebracht.


Cavex SiliconA Bite vloeit gemakkelijk uit de cartridge maar blijft direct na het aanbrengen stabiel, waardoor het beetoppervlak volledig bedekt blijft en het materiaal gelijkmatig verdeeld wordt.

Cavex SiliconA Bite bevat vulstoffen met een hoog reflecterend vermogen. Hierdoor is het materiaal uitstekend te scannen voor CAD/CAM toepassingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cavex:
Telefoon: +31 23 530 77 00
Website: www.cavex.nl

Kenmerken

- Gebruiksvriendelijk
- Snel
- Uitermate thixotroop
- Scanbaar
- Unieke beetregistratietip

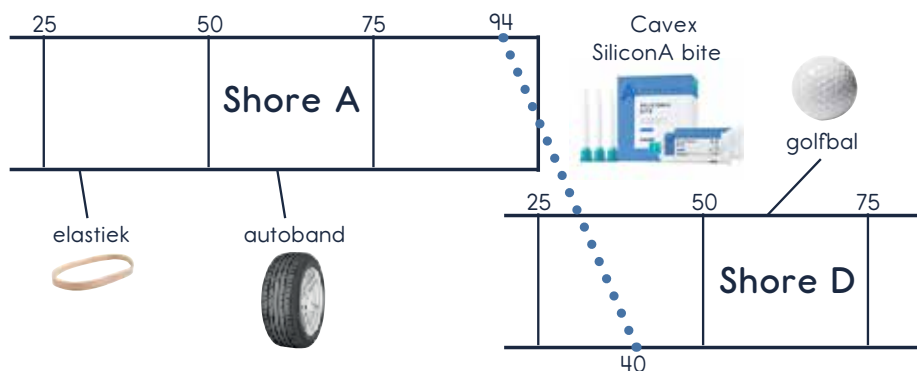

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

CAVEX