

ANA T-fill®

Návod k použití

Cílová skupina pacientů

Děti, dospívající, dospělí a starší pacienti

Předpokládaný uživatel

Zubař

Složení

Kvalitativní údaje:

Sulfát vápenatý, oxid zinečnatý, ethylcelulóza

Kvantitativní údaje:

60 % síran vápenatý

15 % oxid zinečnatý

Účel použití produktu

Pro dočasné výplně.

Indikace

Prozatímní, krátkodobé uzavření zubních dutin.

Kontraindikace

Žádné

Vlastnosti produktu

Těsnicí hmota, samoztvrdnoucí.

Zvláštní preventivní opatření

Žádná

Použití

Pomocí plnicího nástroje naneste potřebné množství ANA T-fill do vlhké dutiny. Ztvrdnutí začíná po několika minutách. Na exponovaných místech se doporučuje 15minutová ochrana. Hluboké dutiny není nutné vyplňovat úplně, což usnadňuje jejich pozdější odstranění. Při uzavírání výplně dbejte na co nejméně tlakovou aplikaci.

K odstranění vytvrzeného ANA T-fill je nevhodnější použít špičatou, krátkou a pevnou sondu, kterou se zavede mezi dentin a výplň.

Varování Zbytková rizika

V každém případě je nutné dodržovat pokyny pro zpracování a bezpečnostní opatření popsané v návodu k použití přiloženém k produktu. Pokud i přes dodržení těchto pokynů dojde u pacienta k nežádoucí reakci nebo k jiným nežádoucím jevům, prosíme v každém případě o zaslání zprávy s co nej přesnějším popisem okolností.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí vedlejší účinky nejsou známy. Rizika předávkování nejsou známa.

Interakce

Interakce produktu a jeho metabolitů s jinými zdravotnickými prostředky, léčivými přípravky nebo jinými látkami není známa.

Skladování

Po každém odebrání materiálu nádobu okamžitě uzavřete. Skladovatelnost uzavřeného obalu: viz etiketa.

Po prvním otevření je přípravek skladovatelný po dobu nejméně 6 měsíců. Neskladujte při teplotě vyšší než 22 °C.

Minimální doba použitelnosti

ANA T-fill po uplynutí doby použitelnosti nepoužívejte.

Varianty

REF1231000 2 sklenice po 30,0 g, bílé

Likvidace

Nepoužitý materiál lze vyhodit do domácího odpadu.

Všechny závažné incidenty související s tímto výrobkem je třeba nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient sídlo.

Distributor ČR BOME Dental s.r.o.

Šípková 220, Čestlice 251 01

Tel.:602 653 168, e-mail:info@bomedental.eu

www.bomedental.eu



dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Německo
Tel.: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

 **Nordiska Dental AB**
Framtidsgatan 1b
26273 Ängelholm/Švédsko
Tel.: +(46) 431/443360
www.nordiskadental.se
mail@nordiskadental.se



Vyrobeno v Německu



H315 způsobuje podráždění kůže
H318 způsobuje vážné poškození očí

2022-08-25

2022-REV-001