

CAVEX BITE & WHITE

KOREKCE ODSŤÍNU

Profesionální produkt pro obnovení odstínu

Gel Cavex Bite&White Shade Correction je založen na aktivním kyslíku, který je přidán ve formě stabilizovaného, zapouzdřeného peroxidu vodíku.

Při kontaktu se slinami se peroxid vodíku rychle rozkládá na kyslík a vodu. Během tohoto procesu vznikají volné radikály, které napadají dvojné uhlíkové vazby, které jsou zdrojem většiny zabarvení (skvrn) na zubech.

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Cavex Bite&White Shade Correction je produkt pro jednorázové použití v ordinaci, který slouží k korekci barvy vitálních a nevitálních zubů za pouhých 30 minut.

KONTRAINDIKACE

Doporučuje se konzultovat s lékařem v případě:

- Těhotné a kojící ženy.
- Osoby, které jsou v současné době léčeny pro závažné onemocnění.
- Osoby mladší 18 let.

KLINICKÝ POSTUP

- Před léčbou se provede vyšetření aktuálního stavu chrupu a stanoví se realistická očekávání ohledně konečných výsledků.
- Během léčby zůstávají kompozitní nebo polykarbonátové materiály neovlivněny. Proto může být po léčbě nutné kompozitní výplně vyměnit, protože ovlivněny budou pouze přirozené zuby.
- U estetických výplní počkejte dva týdny po posledním ošetření, aby se barva stabilizovala.
- Všechny výplně by měly být neporušené nebo dobře utěsněné vhodnými dočasnými materiály.
- Doporučuje se použít desenzibilizátor (např. Cavex ExSense) dva týdny před a dva týdny po léčbě.
- Určete počáteční odstín zubů a zuby vyleštíte pomocí profylaktického úhlu a profylaktické pasty, abyste odstranili zubní plak.

BARRIEROVÝ POSTUP

- Vložte retraktory tváří a osušte dásně vzduchem.
- Naneste bariéru na dásňovou tkáň podél okrajů zubu.
- Vytvrdte po dobu 20 sekund pomocí vytvřzovací lampy.

KOREKČNÍ POSTUP

- Naneste na zuby silnou vrstvu gelu Cavex Bite&White Shade Correction.
- Jako vodítko použijte dávkovací čáry na peru. Jedno pero lze použít pro tři ošetření.
- Po deseti až patnácti minutách gel odsajte.
- Opakujte aplikaci a odstranění dvakrát až třikrát.
- Zuby opláchněte vodou a odsajte. Pozor: během ošetření neoplachujte vodou.

POSTUP PO OŠETŘENÍ

- Určete „barvu zubů po ošetření“.
- Doporučte pacientovi, aby po dobu alespoň dvou týdnů po ošetření používal přípravek na zmírnění citlivosti (např. Cavex ExSense).

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- Gel, který přijde do styku s dásní, může způsobit silné podráždění měkkých tkání.
- Zvýšená citlivost zubů na chlad nebo nespecifická citlivost zubů, dásní, jazyka, rtů nebo krku. Obecně by příznaky měly zmizet během několika dní po ošetření. Ošetření lze pokračovat kratšími a méně častými aplikacemi, dokud není dosaženo požadovaného výsledku. Pokud nepříjemné pocity přetrvávají, ošetření přerušete.

LIKVIDACE

Produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.

Distributor v ČR: BOME Denatl s.r.o.
Šípková 220, 251 01 Čestlice
tel.: 602 653 168, e-mail: info@bomedental.eu
www.bomedental.eu

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- V případě požití gelu okamžitě vypijte vodu, nevyvolávejte zvracení a kontaktujte lékaře.
- Pokud se gel dostane do očí, rozevřete víčka a vyplachujte oči tekoucí vodou po dobu nejméně patnácti minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud se gel dostane do kontaktu s oděvem, pokožkou nebo vlasy, odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku nebo vlasy opláchněte tekoucí vodou.

DOPORUČENÍ PRO SKLADOVÁNÍ

- Pokud přípravek nepoužíváte, skladujte jej v chladničce.
- Krátká přeprava (<1 měsíc) je možná za standardních podmínek.
- Chraňte před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.

Vyrobeno společností Cavex Holland BV

Naše technické poradenství, ať už ústní, písemné nebo formou zkoušek, je poskytováno v dobré víře, ale bez záruky. To platí i v případě, že jsou doložena vlastnická práva třetích stran. Nezabýváje vás to povinností otestovat produkty, které vám dodáváme, z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a použití. Aplikace, použití a zpracování produktů jsou mimo naši kontrolu, a proto jsou zcela ve vaší odpovědnosti. Pokud by i přes naše poradenství došlo k jakékoli škodě, naše odpovědnost je omezena na hodnotu zboží, které jsme dodali a které jste použili. Samozřejmě zajistíme stáloú kvalitu našich produktů v rámci našich Všeobecných podmínek prodeje a dodání.