



Pro povrchovou dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků. Alkohol se nedoporučuje používat na dentální/lékařské nástroje.



Pro dezinfekci povrchů. Používejte biocidy bezpečně a udržitelně. Tento produkt by měl být používán v souladu s etiketou produktu.
PT2 Typ receptury: AL.

Dezinfekční ubrousky

18 x 12 cm

Návod k použití: 1. Odstraňte víčko tuby, 2. Ustříhnete horní část vzduchotěsného plastového sáčku, 3. Protáhněte středový ubrousek otvorem ve víčku a nasadte ho, 4. Vytáhněte ubrousek pod úhlem 45°. Použitím dostatečného množství ubrousků otřete čisté povrchy, které mají být dezinfikovány, tak, aby byly zcela navlhčené, a nechte dezinfekční prostředek působit po dobu 60 sekund. Nechte povrchovou vlhkost odpařit. Pouze pro profesionální použití.

Účinnost (60 sekund): Baktericidní včetně MRSA, VRE. Kvasinkocidní. Mykobaktericidní. Tuberkulocidní. Zahnuje: Neobalené viry: myši norovirus, adenovirus 5. Obalené viry: virus hepatitidy B (HBV), virus hepatitidy C (HCV), virus hepatitidy delta, HIV, virus chřipky, koronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), zardénky, vztekliny, spalničky, poxviridae.

Testováno podle standardů: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Složení: Ethanol (64-17-5) 63 % hm. (630 g/kg), voda, parfémy.

Nebezpečí. H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

První pomoc. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

Vznik požáru. P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou alkoholu nebo CO₂.

Skladování. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. KOUŘENÍ ZAKÁZANO. P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. P235: Uchovávejte v chladu.

Kontraindikace. Neslučitelné materiály: měď, hliník. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol.

Likvidace. Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Nevylévejte kapalinu do kanalizace nebo řek. Nesplachujte. Nemacerovatelné.

Jakýkoli vážný incident související s tímto zdravotnickým prostředkem musí být hlášen výrobci a příslušným orgánům.

verze 01-211

Dezinfekční ubrousky

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
18 x 12 cm



82 90 10



Spotřebujte do: Přidejte datum expirace z doplňovacího sáčku



Tube znovu naplněna x
(vyměňte tubu po 12 naplněních)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



viz sáček

Citron UFI: EE00-V0C9-F00M-WVUD



Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Silsden
W. Yorks, BD20 0EF England, UK



Nebezpečí



1639

Držitel oprávnění:

EC	REP	DIRECTA AB P.O. Box 723, Finvids väg 8 SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
----	-----	---



100 kusů