

PLUS

INSTRUMENT DISINFECTION BLUE FLOWER

KONCENTRÁT

Dezinfekční koncentrát pro nástroje

2,5 L e REF 83 84 04



Nebezpečí

Koncentrát pro ruční dezinfekci lékařských a chirurgických nástrojů metodou ponorné lázně. Pro použití v lékařském sektoru jako dezinfekční prostředek na nástroje, např. v (zubních) ordinacích, klinikách, domovech důchodců, pečovatelských a záchranných službách a pedikérských salonech. Vhodný pro použití v ultrazvukových lázních.

Návod k použití: Koncentrát zředíte (použijte dávkovací láhev nebo dávkovací systém) teplou vodou o teplotě 10 °C až 30 °C (minimálně v kvalitě pitné vody). Podle doporučení RKI/BfArM zajistěte před dezinfekcí důkladné předčištění nebo mechanické čištění a v případě potřeby mezipřepočty nástrojů. Poté okamžitě vložte vyčištěné nástroje v otevřeném stavu do pracovního roztoku. Všechny povrchy a dutiny, které mají být dezinfikovány, musí být zcela navlhčeny pracovním roztokem. V závislosti na stupni znečištění musí být pracovní roztok obnoven (doporučení RKI: alespoň každý pracovní den). Po uplynutí dezinfekční doby nástroje důkladně opláchněte, nejlépe demineralizovanou vodou, a osušte. Podle doporučení RKI se u kritických nástrojů doporučuje konečná sterilizace. Nemíchejte s čisticími prostředky ani jinými dezinfekčními prostředky. Je nutné dodržovat pokyny výrobců nástrojů pro opětovné zpracování a pokyny pro opětovné zpracování podle doporučení RKI/KRINKO. Při nepřetržitém používání nelze vyloučit materiálové změny v polykarbonátu a polyamidu, ale lze jim v maximální možné míře zabránit dostatečným opláchnutím po každém použití. Při použití nových materiálů předem zkontrolujte jejich kompatibilitu. Pracovní roztok lze likvidovat v odpadní vodě. Aby byla zajištěna účinnost, je nutné dodržovat dávkovací množství a expoziční časy co nejpřesněji a nesmí být překročeny. Předávkování by se mělo také vyhnout z důvodů ochrany životního prostředí a kompatibility materiálů. Nevhodné pro terminální dezinfekci kritických zdravotnických prostředků! Pouze pro profesionální uživatele.

Doba působení: Bakterie a *Candida albicans* (EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 a VAH), znečištěné podmínky: 2,0 % 15 min. 1,0 % 60 min. TB (*M. terrae*) podle EN 14348, EN 14563 (čisté podmínky): 2,0 % 60 min. Mykobakterie podle EN 14348, EN 14563 (čisté podmínky): 3,0 % 60 min. „Omezená virucidní účinnost“ (obalené viry, jako jsou HBV, HCV, HIV) podle EN 14476 a EN 17111 za znečištěných podmínek: 0,5 % 15 min. Noroviry podle EN 14476 a EN 17111 (špinavé podmínky): 3,0 % 15 min. Adenoviry podle EN 14476 a EN 17111 (čisté podmínky): 3,0 % 60 min. 4,0 % 30 min. Polyoma SV 40 podle RKI/DVV: 3,0 % 15 min. „Virucidní“ (neobalené viry, jako jsou adenoviry, noroviry, polioviry) podle EN 14476 a EN 17111 (čisté podmínky): 3,0 % 60 min. 4,0 % 30 min. Houby (*A. brasiliensis*) podle EN 13624, EN 14562 (čisté podmínky): 3,0 % 60 min. Doba působení pro terminální dezinfekci polokritických zdravotnických prostředků: 3,0 % 60 min.


Bezpečnostní pokyny: H 302 Zdraví škodlivý při požití. H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H 410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabránit uvolnění do životního prostředí. Používat ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svléknout veškerý kontaminovaný oděv. Opláchnout kůži vodou [nebo se osprchovat]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachovat vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno vyjmout. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy. Obsahuje didecyldimethylamoniumchlorid, 1-aminopropan-2-ol, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin.

(ES) 648/2004 Obsahuje 5–15 % neionogenních povrchově aktivních látek, 5–15 % kationogenních povrchově aktivních látek, vonné látky. Všechny závažné incidenty související se zařízením musí uživatel/pacient nahlásit výrobci a příslušnému orgánu státu, ve kterém je uživatel/pacient usazen.

CH REP PRISMAN Pharma International AG
Am Stalden 16 · CH-4622 Egerkingen

Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands
Prisman GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-8
64653 Lorsch, Germany
+49 6251 8669800

UFI: US5C-N5E7-D109-JFGJ

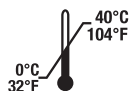

2025-10

Skladování při pokojové teplotě

Distributor:

BOME Dental s.r.o.

Šípková 220, Čestlice 251 01

www.bomedental.eu

tel.: +420602653168

e-mail: info@bomedental.eu