

# POLO DENT<sup>®</sup>

HYGIENE

## Dezinfekční ubrusky Maxi

20 x 20 cm

Čistící ubrusky na povrchy



200 kusů



Pro povrchovou dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků. Alkohol se nedoporučuje používat na dentální/tékařské nástroje.



Pro dezinfekci povrchů. Používejte biocidy bezpečné a udržitelné. Tento produkt by měl být používán v souladu s etiketou produktu.  
PT2 Typ receptury: AL.

**Návod k použití:** 1. Odstraňte víčko tuby, 2. Ustříhnete horní část vzduchotěsného plastového sáčku, 3. Protáhněte středový ubrousek otvorem ve víčku a nasadte ho, 4. Vytáhněte ubrousek pod úhlem 45°. Použitím dostatečného množství ubrousků otevře čisté povrchy, které mají být dezinfikovány, tak, aby byly zcela navlhčene, a nechte dezinfekční prostředek působit po dobu 60 sekund. Nechte povrchovou vlhkost odpařit. Pouze pro profesionální použití.

**Účinnost (60 sekund):** Baktericidní včetně MRSA, VRE. Kvasinkocidní. Mykobaktericidní. Tuberkulocidní. Zahnuje: Neobalené viry: myši norovirus, adenovirus 5. Obalené viry: virus hepatitidy B (HBV), virus hepatitidy C (HCV), virus hepatitidy delta, HIV, virus chřipky, koronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), zarděnky, vzteklna, spalničky, poxviridae.

**Testováno podle standardů:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Složení:** Ethanol (64-17-5) 63 % hm. (630 g/kg), voda, parfémy.

**Nebezpečí:** H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

**První pomoc.** P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚZÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

**Vznik požáru.** P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou alkoholu nebo CO<sub>2</sub>.

**Skladování.** P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. KOUŘENÍ ZAKÁZANO. P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. P235: Uchovávejte v chladu.

**Kontraindikace.** Neslučitelné materiály: měď, hliník. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol.

**Likvidace.** Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Nevylévejte kapalinu do kanalizace nebo řek. Nesplachujte. Nemacerovatelné.

*Jakýkoli vážný incident související s tímto zdravotnickým prostředkem musí být hlášen výrobcí a příslušným orgánům.*


verze 01-2212

## Dezinfekční ubrusky Maxi

20 x 20 cm



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Spotřebujte do: Přidejte datum expirace z doplňovacího sáčku



Tuba znovu naplněná x  
(vyměřte tubu po 6 naplněních)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6



LOT



viz sáček

Citron UFI: EE00-V0C9-F00M-WVDU



Polo MB Oisterwijk BV  
Laarakkerweg 5  
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



Nebezpečí



Topdental (Products) Ltd  
12 Ryefield Way, Silsden  
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

Držitel oprávnění:

EC	REP	DIRECTA AB P.O. Box 723, Finvids väg 8 SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
----	-----	---



1639